


CombiScreen® VET 11



Analiza moczu dla weterynarii

- Paski do analizy moczu eliminacja wpływu kwasu askorbinowego
- wykonane zgodnie z najwyższymi standardami
- dobra jakość – dobra cena
- odczyt zautomatyzowany i manualny

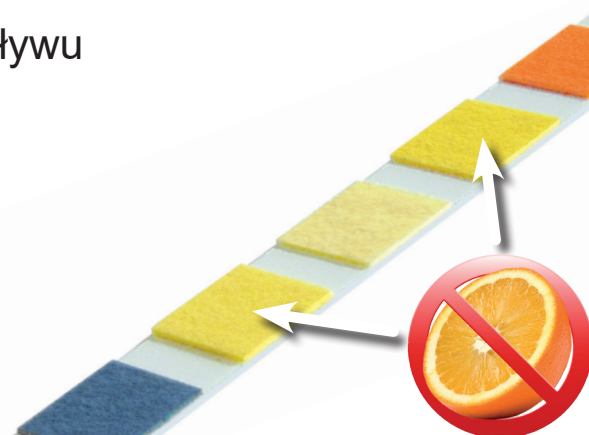

agile - affordable - accurate

combi[®]
screen

PLUS – z ochron kwasu askorbinowego

Name	Art.-Nr.	Cont.	G	Kwas askorbinowy	K	B	pH	K	A	Le	Ciepota	B	Urob
VET 11 Plus	94100V	100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Ochrona kwasu askorbinowego

Kwas askorbinowy, lepiej znany jako witamina C, jest spo ywany głównie z pasz oraz suplementami ywieniowymi. Wi kszo tej substancji jest wydalana z moczem w postaci niezmienionej. Z tego powodu, u du ego odsetka zwierz t, jest obecny podwy szony poziom kwasu askorbinowego w moczu. Wiele pasków do analizy moczu obecnych na rynku daje obni one lub wr cz fałszywie negatywne wyniki oznacze krwi i glukozy, z powodu wpływu obecno ci kwasu askorbinowego. W takich przypadkach postawienie wła ciwej diagnozy oraz podj cie szybkiego leczenia jest niemo liwe. Paski do badania moczu CombiScreen PLUS firmy Analyticon daj potwierdzon wysok wiarygodno wyniku, poniewa maj system eliminacji wpływu kwasu askorbinowego na odczyt innych badanych parametrów.

Informacje ogólne

Zastosowanie pasków do analizy moczu dla zwierz t, mo e dostarczy informacji, które ułatwi postawienie diagnozy. Poza u yciem pasków, powinno si dokona oceny makroskopowej moczu (kolor, m tno, zapach i obj to). Ka dy gatunek zwierz t ma własny zakres warto ci referencyjnych, co przedstawia poni sza tabela.

Parametr	Koń	Krowa	Świnia	Owca	Koza	Pies	Kot	Królik	Ś w i n k a morska
Bilirubina	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg. – słabo poz.	neg.	neg.	neg.
Krew	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Glukoza	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Ketony	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Leukocyty	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Azotyny	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
pH	7,6- 9,0	7,0 – 8,4	5,5 – 8,0	7,5 – 8,5	7,5 – 8,5	5,5 – 7,0	5,0 – 7,0	8,2	8,0 – 9,0
Białko	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
C i ę ż a r właściwy	1,020 – 1,040	1,020 – 1,040	1,020 – 1,040	1,020 – 1,040	1,020 – 1,040	1,001 – 1,065	1,001 – 1,080	1,003 – 1,036	1,000 – 1,040
Urobilinogen	neg. – słabo poz.	neg. – słabo poz.	neg. – słabo poz.	neg. – słabo poz.	neg. – słabo poz.	neg. – słabo poz.	neg. – słabo poz.	neg. – słabo poz.	neg. – słabo poz.
Kolor	gliniasty – brunatno-żółty	Jasnożółty – brązowo żółty	Jasnożółty – ciemnożółty	Jasnożółty – brązowo żółty	Jasnożółty – brązowo żółty	Bładożółty – brązowo żółty	Żółty – ciemnożółty	Jasnożółty – kasztanowy	Żółty
Mętność	Mętny	Klarowny	Klarowny	Klarowny	Klarowny	Klarowny	Klarowny	Klarowny – mętny	Klarowny – lekko mętny
Objętość dobową (ml/ kg)	8 – 30	16 – 50	20 – 80	10 – 40	10 – 40	24 – 50	18 – 25	20 – 350	–
Zapach	Zapachowy	Zapachowy	Zapachowy, nieprzyjemny	Zapachowy – neutralny	Zapachowy – neutralny	Czosnkowy, rosolowy	Zjadliwy	–	–
Odor	Aromatic	Aromatic	Aromatic, unpleasant	Aromatic – neutral	Aromatic – neutral	Garlic, meat broth	Caustic	–	–

Informacje specjalne dla diagnostyki weterynaryjnej

¹⁾ Informacje specjalne dla diagnostyki weterynaryjnej

Poza informacjami ogólnymi dotycz cymi pasków Combi-Screen (zobacz na odwrocie ulotki), jest kilka innych, dotycz cych wył cznie weterynarii. ywienie, przyzwyczajenia dotycz ce pobierania płynów, aktywno fizyczna zwierz cia oraz warunki pobrania próbki moczu, zawsze musz by brane pod uwag podczas analizy. Szczegółowe wyja nienia dotycz ce specjalnych aspektów badania poszczególnych parametrów znajduj si w ulotce doł cznej do opakowania.

Literatur

Kraft / Dürr, klinische Labordiagnostik in der Tiermedizin, 6th wydanie , Verlag Schattauer 2005.

Informacje o dystrybutorach



Analyticon Biotechnologies GmbH
Am Muehlenberg 10
35104 Lichtenfels - Germany
Fon. +49 64 54 7991-0
info@analyticon-diagnostics.com
www.analyticon-diagnostics.com