

Cuvete Urilyzer Cell

REF

ULC001

Instrucțiuni de utilizare

Utilizare preconizată:

Cuvetele Urilyzer Cell sunt recipiente disponibile de unică folosință, făcute din polycarbonat, folosite pentru a analiza probele de urină umană necentrifugate cu ajutorul analizoarelor de sedimente Urilyzer Cell. Sunt destinate utilizării profesionale, de laborator. Sunt destinate utilizării pentru diagnostic in vitro.


Principiul de testare:

Cuvetele Urilyzer Cell sunt recipiente pentru probe care permit analiza microscopică a probelor de urină sau de lichide corporale.

Materiale nefurnizate:

- Urilyzer Cell Analizor de sedimente urinare
- Echipament general de laborator

Folosirea cuvetelor:

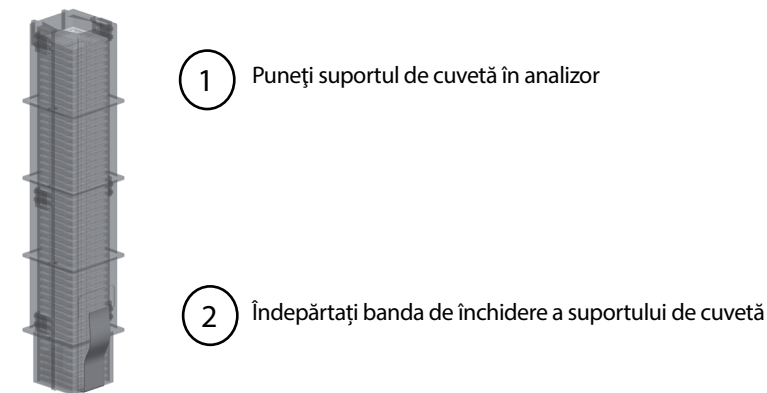

Condiții de mediu

Temperatura de depozitare	0 – 45°C
Temperatura de transport	-25°C – 60°C
Umiditate de transport	20 – 80 %
Temperatura de funcționare	5°C – 40°C
Umiditate de funcționare	20 – 80 %

Avertismente și atenționări

- Nu depozitați cuvetele în lumina directă a soarelui
- Nu îndepărtați banda de închidere de pe suportul de cuvetă înainte de a-l instala în analizor
- Nu îndepărtați suporturile de cuvetă parțial pline din analizor
- Fiecare cuvetă este de unică folosință, nu efectuați niciodată un test cu o cuvetă folosită mai înainte
- Deoarece urina este un lichid de origine umană, aceasta poate fi infecțioasă și poate constitui un potențial risc biologic
- Manipulați cuvetele Urilyzer Cell folosite și contaminanții de urină cu grijă
- Eliminați deșeurile în conformitate cu instrucțiunile și procedurile de laborator acceptate
- Utilizați cuvele înainte de expirare

Consultați instrucțiunile de folosire ale analizorului dvs. pentru a primi detalii privind colectarea specimenelor, eventualele etape de pregătire, calculul rezultatelor, caracteristicile analitice și de performanță, interferențele, limitările, procedurile de control al calității, avertismentele și atenționările specifice

Raportarea incidentelor

Raportați reprezentantului de serviciu Analyticon Biotechnologies și autorității locale competente orice incident grav care ar putea apărea în timpul folosirii acestui produs.

Simboluri:

- Identificatorul unic al dispozitivului
- Dispozitivul medical de diagnostic in vitro
- Numărul de catalog
- Numărul lotului
- Marca CE identifică faptul că produsul respectă directivele aplicabile ale Uniunii Europene
- Folosit de către
- Limitarea temperaturii
- Producător
- Păstrați departe de lumina soarelui
- Consultați instrucțiunile de folosire
- Limitare de umiditate
- Atenție
- Conținut suficient pentru 600 de teste
- NU refolosiți
- Țara de origine a mărfurilor
- Distribuitor

Istoricul versiunii

Versiunea	Data	Modificări
1	05-01-2023	Prima versiune

CE

Producător:

77 Elektronika Kft.
98. Fehérvári út, 1116 Budapest
HUNGARY
www.en.e77.hu
sales@e77.hu
Tel: + 36 1 206 - 1480
Fax: + 36 1 206 - 1481

Distribuitor:

Analyticon Biotechnologies GmbH
Am Muehlenberg 10
35104 Lichtenfels, Germany
info@analyticon-diagnostics.com
www.analyticon-diagnostics.com